


PIGDipper

Handleiding



De PIGDipper bestaat uit de volgende onderdelen:

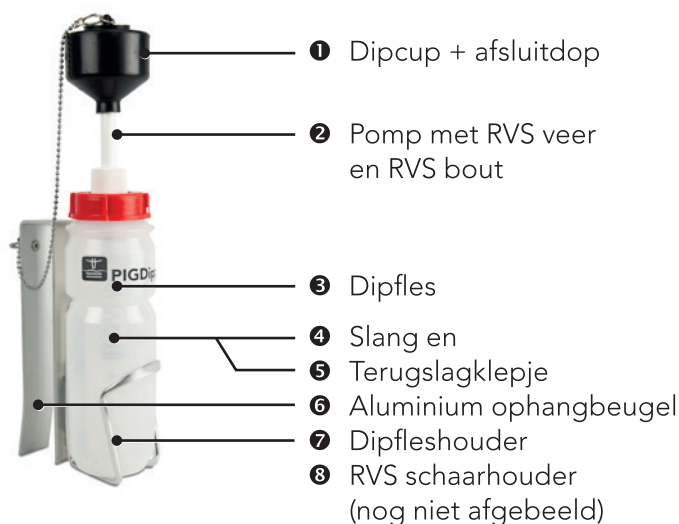

Stap 1

Vullen van de PIGDipper




- Draai de dop met pomp van de dipfles en leg de pomp op een schone en droge ondergrond
- Vul de dipfles met bijgeleverde UmbiDip Naveldipmiddel
- Draai de dop met pomp weer op de dipfles en zet deze in de bijgeleverde dipfleshouder. ►



Ingenieursbureau
Heemskerk B.V.
T: 013 - 505 1658

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com

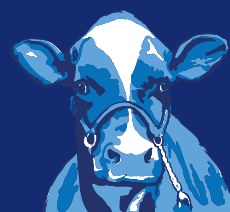

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen hier aan geen rechten worden ontleend. Heemskerk International B.V. en gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook. I.v.m. doorlopende ontwikkeling van onze producten kan het zijn dat afbeeldingen visueel niet overeenkomen met de werkelijkheid. Copyright Heemskerk International B.V.

▶ **Stap 2**

Dippen met de PIGDipper

Alvorens u de navelstrengen van de biggen dipt, adviseren wij u lange navelstrengen in te korten. Dit kan met behulp van een navelstrengschaar. Zorg ervoor dat de schaar regelmatig, bij voorkeur na iedere toom, ontsmet wordt.

- Hang de PIGDipper in de kraamstal aan het schot.
Zorg dat deze stabiel hangt ❶
- Duw de dipcup enkele malen omlaag tot deze +/- 0,5 cm onder de rand gevuld is
- Een volle dipcup is voldoende voor ongeveer één toom biggen
- Pak een big en houd deze met de navelstreng boven de dipcup
- Dompel de navelstreng voor enkele seconden in het naveldipmiddel ❶
- Controleer of de navelstreng volledig is geraakt (zie afbeelding ❷), herhaal indien nodig de vorige stap
- Om de dipcup bij te vullen duwt u deze enkele malen omlaag
- Om vervuiling en verspilling te voorkomen sluit u de dipcup na gebruik af met de afsluitdop.



Reinigen PIGDipper

Voor extra hygiëne raden wij u aan de PIGDipper regelmatig te reinigen. De PIGDipper is volledig te demonteren en alle onderdelen zijn afwasbaar. Let bij het in elkaar zetten van de PIGDipper er goed op dat u het terugslagklepje op de juiste manier op de slang zet. Het pijltje moet naar boven wijzen.

Gebruik BoxClean® in de biggennesten

We adviseren u de biggen binnen 4 uur na de geboorte te behandelen met de PIGDipper.

Strooi voor het werpen +/- 100 gram BoxClean in de biggennesten.

Hiermee verlaagt u de infectiedruk in de kraamstal en beschermt u de biggen direct na de geboorte tegen ziektekiemen.

BoxClean is in Nederland biocide geregistreerd : 13941N

Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik het etiket en de productinformatie